

**GR** Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση.

Πριν τη χρήση, εντοπίστε το βέλος που βρίσκεται στην λαβή του Spin Tip. Αυτό το βέλος δείχνει την κατεύθυνση με την οποία η λαβή πρέπει να περιστρέφεται. Η λαβή δεν πρέπει να περιστρέφεται με την αντίθετη φορά ούτε να πηγαίνει μπροστά και πίσω. Εάν η λαβή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρέστε τη λαβή του Spin Tip (υπάρχει ήδη ενσωματωμένη μία άκρη,) από την θήκη.

#### ΔΕΞΙ ΑΥΤΙ



Καθαρισμός Δεξιού Αυτιού:

- Προσεκτικά και απλά τοποθετήστε την άκρη μέσα στο δεξι αυτί σας. Μην πιέζετε την άκρη πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού.
- Περιστρέψτε με την φορά του βέλους στη λαβή για να συλλέξετε το κερί. Μην περιστρέψετε με την αντίθετη φορά.
- Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην το χρησιμοποιείτε ενώ κινήστε.

#### ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΥΤΙ



Καθαρισμός Αριστερού Αυτιού:

- Προσεκτικά και απλά τοποθετήστε την άκρη μέσα στο αριστερό αυτί σας. Μην πιέζετε την άκρη πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού.
- Περιστρέψτε με την φορά του βέλους στη λαβή (αντίθετα από την φορά του δεξιού αυτιού) για να συλλέξετε το κερί. Μην περιστρέψετε με την αντίθετη φορά.
- Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην το χρησιμοποιείτε ενώ κινήστε.
- Αποθηκεύστε τη λαβή στην προστατευτική θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.

#### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πιέστε και τις δύο πλευρές της άκρης και σπρώξτε μπροστά έως ότου απελευθερωθεί.


- Μετά από κάθε χρήση, ξεχωρίστε την άκρη από την λαβή. Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπουνάδα και ξεπλύνετε καλά.
- Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε μία άκρη για κάθε αυτί.
- Πετάξτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην το πετάτε στην λεκάνη της τουαλέτας. Αποθηκεύστε το Spin Tip στην προστατευτική του θήκη, όταν δεν χρησιμοποιείται.

#### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΡΗΣ



#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΗΣ

- Υπάρχουν επιπλέον ακρες στην προστατευτική θήκη.
- Για να τοποθετήσετε μια άκρη στην λαβή, ευθυγραμμίστε τις οπές που βρίσκονται πάνω στην άκρη με τα εξογκώματα που βρίσκονται στη λαβή.
- Πιέστε προς τα κάτω απαλά για να κλειδώσει.

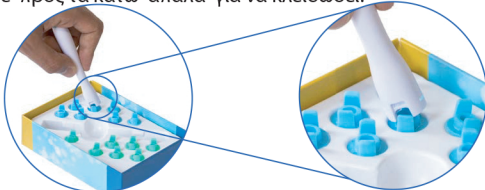

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το σωλήνα του αυτιού.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν νιώθετε πόνο, δυσφορία, απώλεια ακοής, πίεση ή αιμορραγία.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Spin Tip δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις χωρίς την επίβλεψη του γιατρού

- Από ανθρώπους που υποφέρουν από το Σύνδρομο Maniere ή νοιώσουν ζαλάδα, ίλιγγο, δυσκολία στην ακοή ή άλλες ασθένειες του αυτιού.
- Από ανθρώπους με λοιμώξεις.
- Από ανθρώπους με πρόβλημα στο σωλήνα του αυτιού.
- Από ανθρώπους που έκαναν μαστοειδή χειρουργική επέμβαση.
- Από ανθρώπους με τωρινή ή προηγούμενη διάτρηση του τυμπάνου.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σπρώχνετε ή πιέζετε το κερί μέσα στο αυτί. Αυτό το προϊόν δεν είναι για βαθιά εισχώρηση στο κανάλι του αυτιού. Το κερί του αυτιού παράγεται κοντά στην είσοδο του καναλιού του αυτιού, γνωστό ως εξωτερικό κανάλι.

Το συμπαγές κερί πρέπει να αφαιρείται από κάποιον ειδικό. Στρέψτε μόνο προς την κατεύθυνση που αναφέρεται στη λαβή γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

