


## Clever Cane

Καινοτόμο ! Σχεδιασμός με δύο λαβές για πρόσθετη στήριξη.

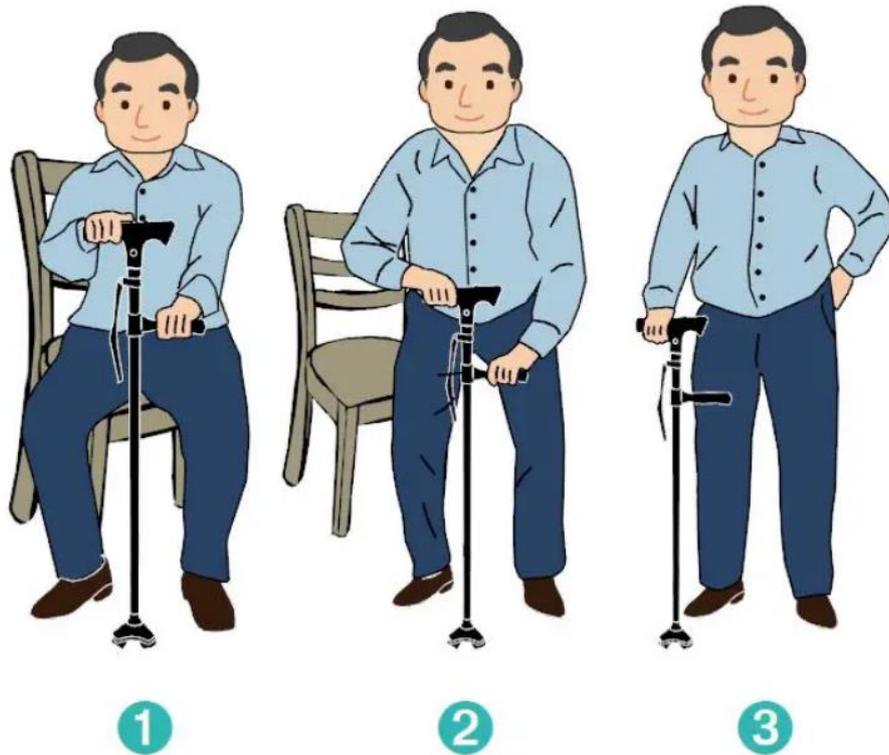

### Χρήση διπλής λαβής

1. Ανοίξτε τις λαβές
2. Σκύψτε προς τα εμπρός
3. Σηκώστε τον εαυτό σας



## Περιγραφή προϊόντος

- 1 Λαβή
- 2 Τμήματα μαστουιού
- 3 Λουράκι καρπού
- 4 Ελαστικό κορδόνι
- 5 Κουμπί ρύθμισης μήκους
- 6 Φως LED
- 7 Διακόπτης φωτός
- 8 Θήκη μπαταριών
- 9 Συναγερμός
- 10 Διακόπτης συναγερμού

**Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.**

## Ξεδιπλώνοντας το Clever Cane

Το Clever Cane διαθέτει έναν ιμάντα καρπού, που κρατάει τα τμήματα του μαστουιού ενωμένα, όταν το μαστούνι είναι διπλωμένο. Για να ξεδιπλώσετε το μαστούνι, ξεκουμπώστε πρώτα τον ιμάντα καρπού (3). Πιάστε τη λαβή (1), κρατήστε την ψηλά και αφήστε τα τμήματα του μαστουιού (2) να ξεδιπλωθούν με τη δύναμη της βαρύτητας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε τις πτώσεις, βεβαιωθείτε πάντα, ότι όλα τα τμήματα του μαστουιού (2) είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα και ασφαλισμένα στη θέση τους (βλέπε σχήμα Β) και ότι το μαστούνι είναι άκαμπτο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση του ελαστικού κορδονιού (4) στο εσωτερικό του μαστουιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε απροσάλευτα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα μάτια. Εάν το ελαστικό κορδόνι (4) σπάσει, καταστραφεί ή φθαρεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην τεντώνετε το ελαστικό κορδόνι (4) περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για να ξεδιπλώσετε ή να διπλώσετε το μαστούνι (2).

## Ρύθμιση του μήκους ανάλογα με τις ανάγκες σας

Υπάρχουν πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους. Για να το κάνετε μακρύτερο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης μήκους (5) όπως φαίνεται στην εικόνα C, τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή και αφήστε το κουμπί ρύθμισης για να το αφήσετε να ασφαλίσει σε μια χαμηλότερη σχισμή. Για να κάνετε το μαστούνι κοντύτερο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης μήκους (5), πιέστε προς τα κάτω τη λαβή και αφήστε το κουμπί ρύθμισης για να το αφήσετε να ασφαλίσει σε μια υψηλότερη σχισμή.

## Χρήση του φωτός LED

Ένα ρυθμιζόμενο φως (6) βρίσκεται στο άκρο της λαβής (1). Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως, πατήστε το διακόπτη φωτός (7) στη λαβή του μαστουιού (1).

Το φως περιστρέφεται προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε να μπορείτε να το στρέψετε προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

### **Χρήση του συναγερμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης**

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το συναγερμό, πατήστε το διακόπτη συναγερμού (10), που βρίσκεται στο τμήμα κεφαλής της λαβής του μπαστουνιού.

### **Αναδιπλώστε το Clever Cane**

Για να αποθηκεύσετε το μπαστούνι, διαχωρίστε τα τμήματα όπως φαίνεται στην Εικόνα D και διπλώστε τα μαζί τα. Στερεώστε τα με τον ιμάντα καρπού (3). Ασφαλίστε τα τμήματα με τους συνδέσμους, σε κάθε άκρο του ιμάντα.

### **Τοποθετήστε και αλλάξτε τις μπαταρίες**

Το Clever Cane λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται). Η θήκη μπαταριών (8) βρίσκεται στο άκρο της λαβής, ανοίξτε την και τοποθετήστε ή αλλάξτε τις μπαταρίες.

### **Οδηγίες Ασφαλείας**

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το **Clever Cane** για πρώτη φορά.
- Πάντα να συμβουλευέστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Clever Cane.
- Μην αποσυναρμολογείτε το σώμα (με το ελαστικό κορδόνι) του μπαστουνιού.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση.
- Δεν είναι κατάλληλο για σκι.
- Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε σε πάγο, υγρές ή ολισθηρές επιφάνειες.
- Το προϊόν αυτό δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει βοήθημα βάδισης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1985 (για τα μπαστούνια πεζοπορίας).
- Μην χρησιμοποιείτε το μπαστούνι εάν είναι ελαττωματικό.
- Δεν προορίζεται για άτομα άνω των 115 kg.